

i-INSERT

Aide à la pose pour
lentilles sclérales



appenzeller
kontaktlinsen[®]
passt.

Mode d'emploi
de l'aide à la pose
i-INSERT pour
les lentilles sclérales

→ Se laver les mains

Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon. N'utilisez pas de savon gras.

→ Nettoyer i-INSERT

Nettoyer i-INSERT avec de l'eau si celui-ci est devenu poussiéreux. Placez i-INSERT sur une table, de façon à ce que votre œil soit facilement accessible

→ Nettoyer et mettre en place la lentille

Nettoyez vos lentilles sclérales conformément aux instructions du fabricant ou de votre spécialiste en lentilles de contact. Positionnez votre

lentille sclérale au centre, la face antérieure dirigée vers le haut, sur le support de i-INSERT. Remplissez votre lentille sclérale avec une solution saline appropriée.

→ Positionnez doucement votre œil sur la lentille.

Écartez vos paupières avec vos doigts et placez votre œil ouvert au-dessus de l'i-INSERT. La lumière intégrée vous aide à trouver une position correcte. Appliquez doucement votre œil dans la lentille sclérale jusqu'à ce qu'elle adhère naturellement à votre œil.

→ Remarque importante

Ce processus peut nécessiter un certain niveau de pratique et de persévérance. Si cela ne fonctionne pas immédiatement, remplissez à nouveau votre lentille de contact et essayez à nouveau. Votre spécialiste en lentilles de contact est là pour vous aider en cas de problème lors de la pose de vos lentilles sclérales.

